

チ タ ン サ イ ザ ー


Titan-Sizer

製造販売届出番号 18B1X00004000021
讚岐式甲状軟骨開創器

甲状軟骨形成術 2 型 ブリッジ選定用器具


実用新案登録 第 3230512 号

- ・ 生体親和性に優れたチタン合金製
- ・ 蒸気滅菌での腐食なし
- ・ 患者様に適したブリッジのサイズを特定可能
- ・ 軟骨組織間に挿入した状態で患者様の発声が可能
- ・ 各幅ごとに識別用の発色（陽極酸化）あり

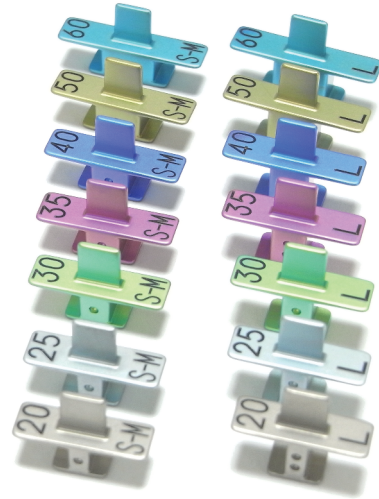


ブリッジ S、M サイズ用


ブリッジ L サイズ用

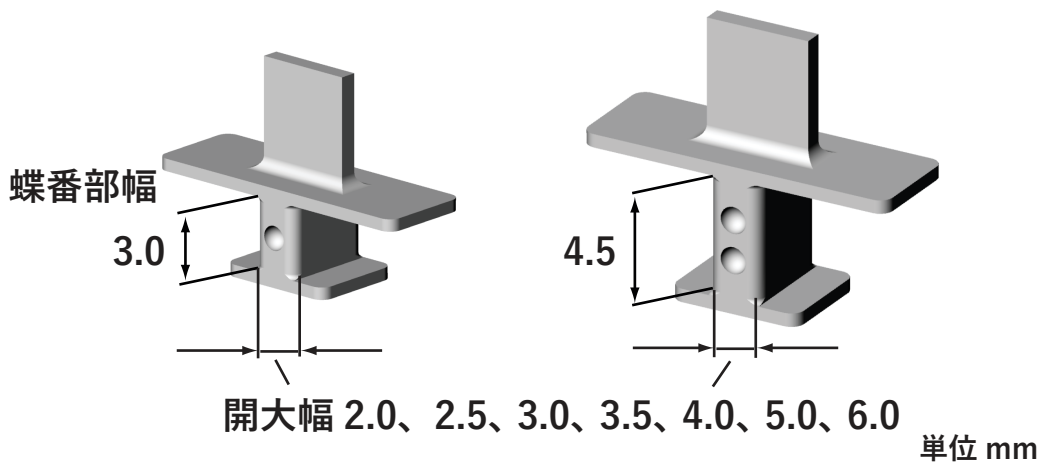


使用方法

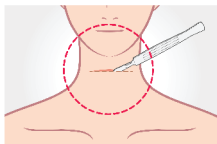


① 膜元を切開する

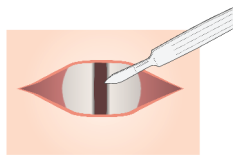


② 声門を露出・切開する

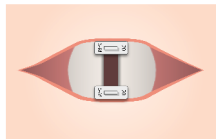

③ チタンサイザーをはめてみる

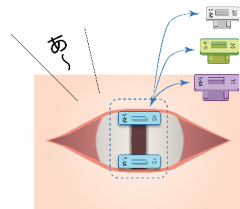

④ 声を確認しながら、ちょうどよいサイズのチタンサイザーに取り替えていく

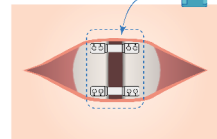

⑤ サイズが決まったら同じサイズのブリッジを装着して完了

製造販売元 (株) 若吉製作所

〒916-0005 福井県鯖江市杉本町 36 号 2 番地 TEL (0778) - 51 - 2815